


Návod na použitie

Príprava rany a jej okolia

- Vždy musíte zaistiť, aby bola rana a jej okolie dokonale suché.
- Ak je to potrebné, odstráňte všetko ochlpenie z okolitej kože, aby ste zaistili dobrý kontakt pokožky s adhezívnym okrajom krytia a s fixačnými prúžkami.


Avelle™
 Pozitívna sila podtlakovej terapie

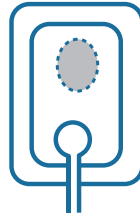


Podmienky pre správne umiestnenie krytia na ranu

- Uistite sa, že rana nie je väčšia ako 25% rozmeru vankúšika krytia, potrebný je presah aspoň o 1 cm na kožu v okolí rany (napr. krytie s rozmerom 16 x 21 cm je určené na hojenie rán s maximálnou veľkosťou 6 x 7 cm). (Informácie o veľkosti plochy Hydrofiber® sú uvedené na obale.)

1. Aplikácia krytia

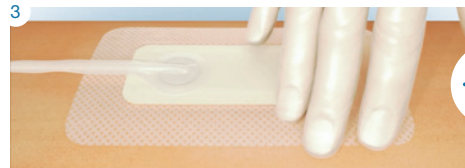


- Uhladzte okraj krytia tak, aby dobre priliehal a nedošlo k jeho pokrčeniu a zvrásneniu.
- Ak dôjde k pokrčeniu, zmeňte polohu krytia tak, aby vrásnenie nevznikalo. Zmenou polohy neporušíte prilnavosť krytia.

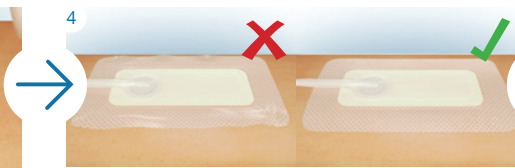

- Dbajte na to, aby na krytí po aplikácii nezostali žiadne záhyby, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť tesnenie a funkčnosť celého systému.



- Zabezpečte, aby pokožka pred aplikáciou bolo suchá a odmastená.
- Vyberte krytie zo sterilného obalu.
- Odstráňte ochrannú fóliu.

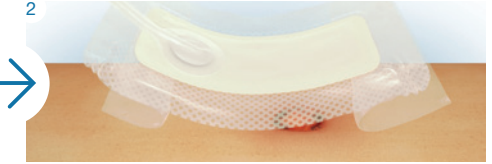

- Priložte krytie centrálne nad ranu a dostatočne ďaleko od adhezívnych okrajov.
- Uistite sa, že port je mimo rany a nad neporušenou kožou. Vytekajúca tekutina sa tak nedostane do hadičky, ktorá zabezpečuje podtlak.



- Na všetky štyri strany krytia aplikujte fixačné prúžky.
- Najprv odstráňte centrálnu ochrannú fóliu označenú „1“. Priložte fixačný prúžok a odstráňte časti označené „2“. Nakoniec odstráňte horný diel označený „3“.



- Uistite sa, že krytie presahuje na všetkých stranách minimálne o 1 cm na neporušenú okolitú kožu.
- Skontrolujte, či po aplikácii zostali všetky hadičky voľne priechodné.
- Fixačné prúžky zabezpečujú dokonalé utesnenie krytia po celý čas jeho použitia.

2. Pripojenie pumpy



Pumpu, vákuové hadičky a batérie vyberte z obalu. 3x AAA batérie vložte do schránky na batérie na zadnej strane pumpy a schránku uzavrite krytom.



Hadíčky je možné pripojiť jednoduchým krúživým pohybom. Nepretočte závit, aby nedošlo k poškodeniu úchytu. Ak dávate prednosť kratšiemu spojeniu, môžete krytie spojiť priamo s pumpou.



3. Aplikácia podtlaku



Stlačte a pridržte modré tlačidlo na prednej strane pumpy po dobu 3 sekúnd, čím pumpu spustíte. Zelené indikačné svetlo začne blikať a potvrdí tak, že pumpa začala pracovať. Asi za 30 sekúnd sa dosiahne podtlak a po celý čas budete počuť pumpu pracovať.



V prípade, že nie je dosiahnutý požadovaný podtlak alebo niekde došlo k porušeniu utesnenia krytia, rozsvieti sa žlté svetlo. Skontrolujte utesnenie krytia a vyrovnajte prípadné záhyby a zvrásnenia. Skontrolujte správne pripojenie všetkých hadičiek.



Akonáhle sa dosiahne požadovaný podtlak, krytie sa sploští.

4. Výmena krytia

Interval výmeny krytia vždy určuje ošetrojúci zdravotnícky pracovník. Dôvodom výmeny krytia môže byť aj strata funkčnosti, napr. podtekanie, zhromažďovanie tekutiny okolo ústia portu alebo strata lepidivosti krytia.

- Bežný interval výmeny je 3 – 4 dni, maximálny je 7 dní.
- Vypnite pumpu stlačením a pridržením modrého tlačidla po dobu 3 sekúnd. Odpojte vákuovú hadičku od krytia a prejdite k výmene krytia.



Tu odpojte

Opatrne napnite fixačné prúžky, čím zrušíte lepidivosť a krytie môžete odstrániť.



Vymeňte krytie skôr ako sa exsudát dostane k portu krytia.

5. Výmena pumpy



- Pumpa je skonštruovaná tak, aby pracovala po dobu 30 dní od zahájenia podtlakovej terapie.
- Je možné, že v priebehu 30 dní bude potrebné vymeniť batérie.
- Ak sa rozsvieti svetlo, je potrebné vymeniť batérie.



Po 30 dňoch všetky svetlá na pumpe zhasnú a už sa nerozsvietia.

Pred výmenou pumpy odpojte vákuovú hadičku od krytia odskrutkovaním konektorov, pripojte novú pumpu a nové hadičky.

6. Výplne rán, kontaktné vrstvy, kompresie



Pri hlbších ranách do 2 cm je možné použiť výplň z krycích materiálov, ako je napr. AQUACEL® Extra™ alebo AQUACEL®. Ak nie sú k dispozícii, môže sa použiť gáza. Výplne sa musia meniť zároveň s krytím Avelle™.

Systém Avelle™ sa môže použiť v spojení s kompresnou terapiou, ak je to žiadúce. Ak budete používať systém Avelle™ v kombinácii s kompresnou terapiou, dbajte na to, aby hadičky boli vždy umiestnené a vedené po vonkajšej strane bandáže.

Viete, že...

konektor krytia je vybavený jednocestným ventilom? V prípade, že odpojíte pumpu, krytie Avelle™ udrží podtlak po dobu približne 60 minút.* Preto je možné ľahko sa osprchovať. Pred sprchovaním je však potrebné odpojiť pumpu rozpojením od konektoru krytia, ako je uvedené vyššie.

Podtlakovú terapiu obnovíte spojením konektoru hadičky s konektorom krytia a zapnutím pumpy, ako je uvedené vyššie.

Potrebujete viac informácií?

Nájdete ich v návode na použitie priloženom k systému podtlakovej terapie Avelle™. Tento návod na použitie obsahuje kompletne pokyny na používanie systému, k prevádzke pumpy a smernicu ako riešiť prípadné poruchy.

Prosím, kontaktujte ConvaTec, ak budete potrebovať pomoc pri nastavení, údržbe či používaní systému podtlakovej terapie Avelle™, alebo pri neočakávaných príhodách, varovaniach či poruchách systému.

Pre viac informácií o systéme podtlakovej terapie Avelle™ volajte na našu bezplatnú zákaznícku linku 0800 800 111. Na tomto telefónnom čísle je taktiež možné dohodnúť návštevu nášho obchodného zástupcu.

* Ako bolo dokázané testom *in vitro*

Jediný systém kombinujúci podtlakovú terapiu rán s technológiou Hydrofiber®



Zákaznícke centrum ConvaTec, Unomedical, s.r.o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, tel.: 037/77 64 931
www.convatec.sk

Distribúcia:

STOMIA s.r.o., Staničné nám. 1, 040 01 Košice, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel./fax: 055/625 22 88
PHAREX s.r.o., Prieložtek 1, 036 01 Martin, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel.: 043/381 04 70, fax: 043/4223 569

1. Airway Negative Pressure Luer Fitting Test. Doc number DOC-RN-115-ref-1. Data on file 2015.
®/™ označujú obchodnú známku ConvaTec Inc. ConvaTec je autorizovaný používateľ. © 2017 ConvaTec Inc. AP-017367-MM

