


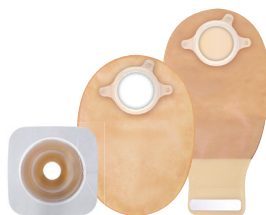


NATURA®

TVAROVATELNÁ PODLOŽKA




1


Určenie správnej veľkosti.

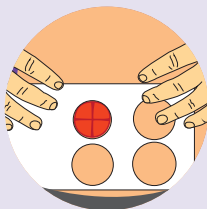

Odmerajte si stómiu a vyberte správnu veľkosť tvarovateľnej podložky.

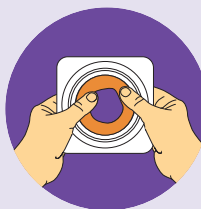


Vymodelujte podložku pomocou prstov, potom vyroľujte a vytvarujte adhezívum tak, aby zodpovedalo veľkosti a tvaru stómie. **Nenaťahujte, neťahajte ani nestríhajte.**

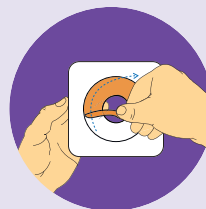


Odstráňte priehľadnú ochrannú fóliu zo zadnej strany podložky. Priložte otvor nad vašu stómiu.

2


Aplikácia podložky na pokožku.

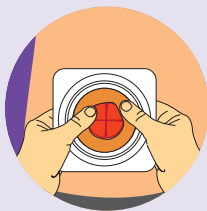

Pritlačte podložku v mieste aplikácie a pokiaľ to bude potrebné, prispôbte už vyroľovaný otvor na adhezíve podľa veľkosti stómie. Jemne pridržte podložku na koži po dobu asi 30 sekúnd.

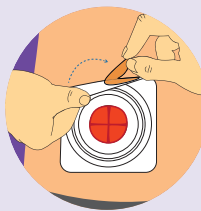


Odstráňte bielu ochrannú fóliu z okrajov podložky.

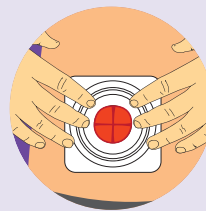


Jemne pritlačte na kožu a vyrovnajte záhyby na podložke.

3 Aplikácia vrečka a jeho uzavretie.

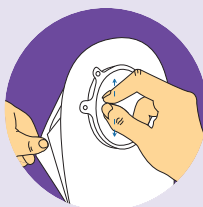


Oddelte strany vrečka od seba a umožnite vniknúť dovnútra vzduch.

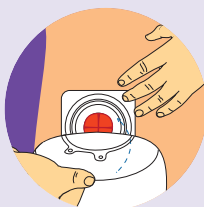


Priložte prírubu na vrečku k prírubu na podložke. Jemne pritlačte vrečko a podložku k sebe, začnite smerom zdola nahor tak, aby ste niekoľkokrát počuli cvaknutie, ktoré bude znamenať, že vrečko a podložka do seba bezpečne zapadli.

Vždy dvakrát skontrolujte, či je spojenie bezpečné. Ak nie, zopakujte celý postup ešte raz.

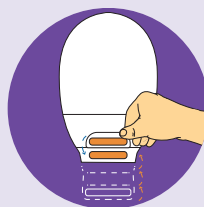


Výpust uzavrite preložením suchých zipsov 3x od konca smerom hore tak, aby celou plochou do seba zapadli a stlačte ich po celej dĺžke.

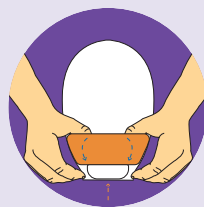


Pre väčšiu bezpečnosť a diskrétnosť prehnite prednú časť úschovného vrečka, čím schováte výpust dovnútra.


4 Vyprázdnenie a čistenie vrečka.

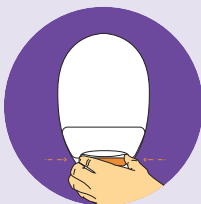

Na vyprázdnenie obsahu z vrečka uchopte výpust a stlačením obidvoch strán k sebe ho otvorte, čím obsah vyprázdните.

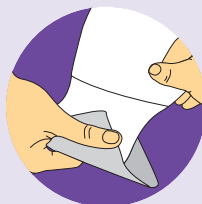


Rady pre čistenie vrečka: Podržte vrečko jednou rukou a očistite výpust na vrečku toaletným papierom, ktorý držíte v druhej ruke.

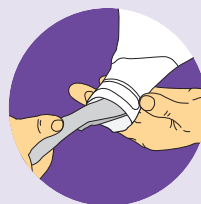


Vyčistite vnútornú časť výpustu toaletným papierom alebo detskými vlhčenými utierkami.

5 Odstránenie vrečka.

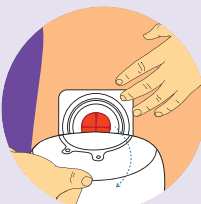

Vrečko odstránite tak, že jednou rukou pridržíte podložku a druhou rukou jemne potiahnete vrečko smerom nadol.

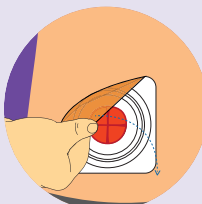

Jednou rukou jemne odtiahnite podložku smerom nadol z pokožky a druhou rukou si pridržiavajte kožu v okolí stómie.

OSLAVUJEME
1991 **25** 2016
ROKOV
na Slovensku