

# NOVINKA Natura® podložka s harmonikovým krúžkom s tvarovateľnou technológiou™

Navrhnutá tak, aby bola aplikácia vrecka jednoduchá a pohodlná – prináša dokázanú ochranu kože<sup>1</sup> pre vašich pacientov.



## DISKRÉTNOSŤ:

Pozícia „HORE“ poskytuje dostatok priestoru pre prsty, takže vrecko môže byť pripevnené k podložke s minimálnym tlakom na brucho. Pozícia „DOLE“ zabezpečuje nízky profil pomôcky, ktorý je flexibilný a zodpovedá tvaru tela.



## BEZPEČNOSŤ:

Elastické adhezívum, ktoré sa prispôsobí veľkosti a tvaru stómie, neuveriteľne dokonale a bezpečne k nej prilne, utesní ju, čím sa zabráni podtekaniu. Znamená to menej podtekania a zdravšiu kožu<sup>1</sup>.



## JEDNODUCHOSŤ:

Prstami sa vytvára otvor, pričom sa adhezívum prispôsobí každému tvaru a veľkosti stómie. Nestrihá sa, nenaťahuje, neodhaduje sa veľkosť.



## POHODLNOSŤ:

Flexibilná podložka sa pohybuje s telom a môže sa dať do polohy „dole“, čím sa vytvorí plochý, nízky profil. Natura® tvarovateľná plochá podložka s harmonikovým krúžkom je kompatibilná s našimi pohodlnými vreckami ☺



pozícia „HORE“



pozícia „DOLE“

# NOVINKA Natura® tvarovateľná plochá podložka s harmonikovým krúžkom

Určená pre všetkých ľudí so stómiou, ktorí chcú mať každodenný komfort.



## Preukázaná sila ConvaTec tvarovateľnej technológie™

• viac ako 95 % ľudí so stómiou, ktorí začali s tvarovateľnou technológiou si udržalo zdravú kožu<sup>1</sup>

Novinka od 1. 10. 2015 Natura® tvarovateľná plochá podložka s harmonikovým krúžkom				
kód produktu	ŠUKL	Názov produktu	doplňok názvu	balenie/ks
421030	F93698	Podložka Natura tvarovateľná plochá s harmonikovým krúžkom	priemer 57 mm, otvor 13 – 22 mm	5 ks
421031	F93699	Podložka Natura tvarovateľná plochá s harmonikovým krúžkom	priemer 57 mm, otvor 22 – 33 mm	5 ks
421032	F93700	Podložka Natura tvarovateľná plochá s harmonikovým krúžkom	priemer 70 mm, otvor 33 – 45 mm	5 ks

Referencie: 1. Clinical Summary: Osmose Study, Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in New Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Data on file. ConvaTec Inc. 2015. 2. Report: WHRI3940 TA238. Data on file. ConvaTec Inc. 2013



**Tlak je preč!** Harmonikový krúžok sa jednoducho nadvihne a poskytuje doteraz najväčší priestor pre prsty.<sup>2</sup> Vytvára sa dostatočný priestor pre jednoduchosť spojenia vrecka s podložkou. Pozícia „DOLE“ poskytuje plochý, nízky profil pomôcky, ktorý je extrémne flexibilný a zodpovedá tvaru tela. Podložka je použiteľná s našimi vreckami ☺


Stomalinko ConvaTec  
0800 800 111  
pre volajúceho zadarmo

Zákaznícke centrum ConvaTec, Unomedical, s.r.o., Štúrova 71A, 949 01 Nitra, tel.: 037/77 64 931, fax: 037/77 64 933  
[www.convatec.sk](http://www.convatec.sk)


Distribúcia:  
STOMIA s.r.o., Staničné nám. 1, 040 01 Košice, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel./fax: 055/625 22 88  
PHOENIX, Z.z., a.s. Pribylínská 2/A, 831 04 Bratislava, tel. 02/499 99 111  
PHAREX s.r.o., Prieloztek 1, 036 01 Martin, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel.: 043/381 04 70, fax: 043/4223 569  
™ je obchodná známka ConvaTec Inc. Natura, Stomahesive a Durahesive sú registrované obchodné známky v USA.  
© 2015 ConvaTec Inc. AP-015055-MM

ConvaTec


ConvaTec

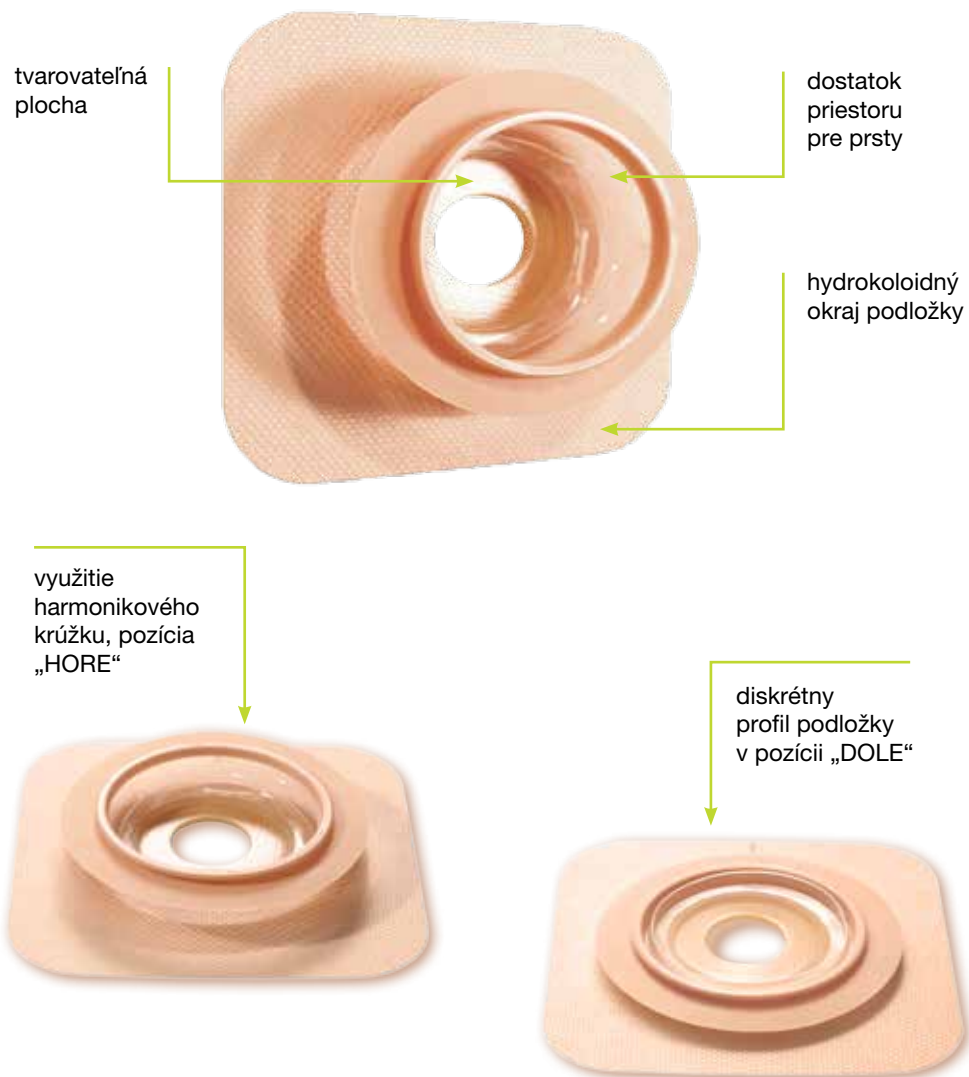


### 1 Aplikácia podložky s harmonikovým krúžkom

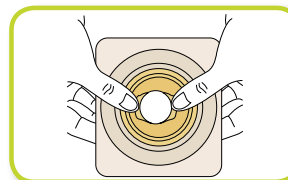

**1. Neodstraňujte priehľadnú ochrannú fóliu zo zadnej strany podložky.** Rolovaním vytvarujte hmotu tak, aby otvor zodpovedal veľkosti vašej stómie.

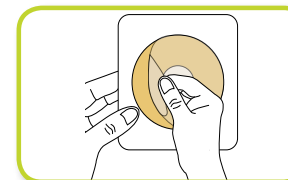

**2.** Teraz odstráňte ochrannú priehľadnú fóliu zo zadnej strany a podložku prilepte na suchú, čistú kožu.

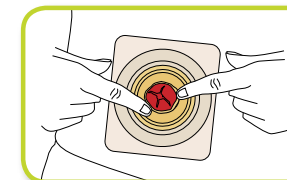


**3.** Najskôr prstami pritlačte vnútornú časť podložky tak, aby vytvorená manžeta tesne obomkla stómiu. Teraz odstráňte aj bielu ochrannú fóliu zo zadnej strany podložky. Pritisknite k pokožke po celom obvode a uhladte. Podložku pridržte cca 30 sekúnd, aby čo najlepšie priľnula na koži.


### 2 Aplikácia vrecka



**1.** Odtiahnite zadnú časť stomického vrecka a umožnite vniknutie vzduchu dovnútra.

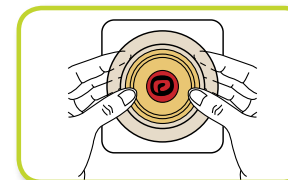


**2. NADVIHNITE** harmonikový krúžok vsunutím prstov do priestoru medzi podložku a prírubový krúžok. Palcami pridržiavajte prírubový krúžok podložky.

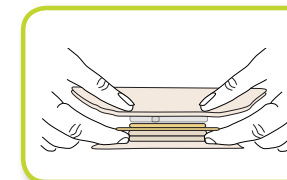

**3.** Prírubový krúžok podložky a vrecka do seba zacvaknite, postupujte zdola po celom obvode krúžku. O správnom postupe vás presvedčí početné cvaknutie. Zatiahnete za vrecko, aby ste si overili bezpečné a pevné spojenie.

### 3 Odstránenie vrecka

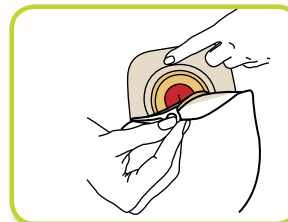

Podložku pridržiavajte jednou rukou, **prstom pritlačte harmonikový krúžok** a druhou chyťte vrecko za uško. Ťahom zhora dole oddelíte vrecko od prírubového krúžku podložky.