

Jednoduché ošetrenie preležanín.

AQUACEL™
krytia

1 POSÚDIŤ

- Kompletné vyhodnotenie kože: klasifikovať* v súlade s klasifikáciou preležanín EPUAP-NPUAP.
- Pri II. – IV. štádiu je potrebné celkové posúdenie rany:
 - vzhľad spodiny rany (typ tkaniva a % prítomnosť povlaku, nekrózy, granulácie, podozrenia na biofilm);
 - veľkosť (dĺžka, šírka, hĺbka, podmínavanie);
 - secernácia (farba, konzistencia, stupeň);
 - pridružená bolesť a /alebo zápach;
 - stav okolitej kože (opuch, zmena farby, macerácia);
 - známky a príznaky infekcie (bolesť, zápach, teplo, začervenanie, opuch, hnisanie).

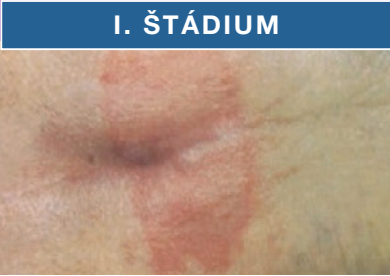
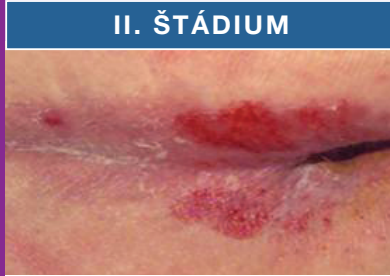
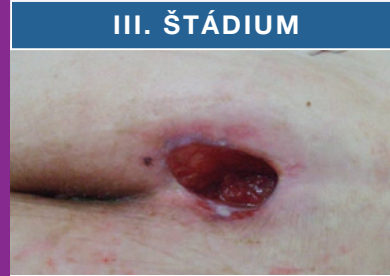
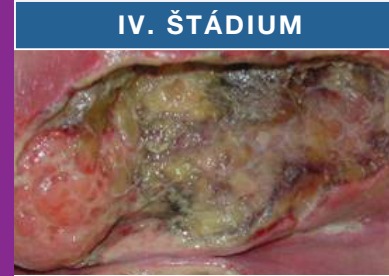
2 MANAŽOVAŤ

- Vyčistíte ranu a v prípade potreby urobte debridement na odstránenie prekážok z rany, ktoré bránia jej hojeniu, napríklad povlak, nekroza, biofilm.
- Vyberte krytie, ktoré:
 - manažuje exsudát
 - chráni kožu v okolí rany
 - udržuje vlhké prostredie v rane
 - je pohodlné pre pacienta
- Zvážte potrebu použitia antimikrobiálneho krytia pre preležaniny, ktoré sú infikované alebo s rizikom vzniku infekcie.

3 SLEDOVAŤ

- Zhodnoťte preležaninu pri každom preväze a zadokumentujte.
 - Poznámka: Spätná klasifikácia by nikdy nemala popisovať hojenie preležaniny[†].
- Prehodnoťte výber krytia, pričom zvážte zmeny v hĺbke a symptómoch preležaniny.
- Potrebné je zvážiť aj následné ďalšie použitie ochrany kože po zhojení preležaniny.


KLASIFIKÁCIA PRELEŽANÍN & VÝBER KRYTIA

I. ŠTÁDIUM	II. ŠTÁDIUM	III. ŠTÁDIUM	IV. ŠTÁDIUM
			
<p>Tlaková lézia s pretrvávajúcim začervenaním bez poškodenia kože. Vytvorí sa zvyčajne v mieste nad výčnelkom kosti. Tmavo pigmentované miesto nemusí viditeľne blednúť.</p>	<p>Povrchové poškodenie kože sa prejaví ako povrchová preležanina s ružovou spodinou rany bez povlaku. Môžu sa tiež objaviť neporušené alebo otvorené / prasknuté s tekutinou alebo tekutinou a krvou naplnené pľuzgiere.</p>	<p>Hlboké poškodenie kože, podkožia a svaloviny so zasahovaním ku kosti. Môže byť prítomný povlak, ktorý však neprekrýva hĺbku straty tkaniva. Môžu sa tu vyskytovať podmínavané miesta a tunely.</p>	<p>Rozsiahla deštrukcia s nekrozou svalového tkaniva, fascii, nervov, ciev, kĺbových púzdiar a poškodením kostí. Môže sa tu vyskytovať povlak alebo chrasta. Často sú prítomné podmínavané miesta a tunely.</p>
<p>AQUACEL™Foam GRANUFLEX® <i>Extra Thin</i> FoamLite ConvaTec</p>	<p>AQUACEL™Foam AQUACEL™Ag+Foam[†]</p>	<p>AQUACEL™Extra alebo AQUACEL™Ag+Extra[†] + AQUACEL™Foam alebo AQUACEL™Ag+Foam</p>	<p>AQUACEL™Extra alebo AQUACEL™Ag+Extra[†] + AQUACEL™Foam alebo AQUACEL™Ag+Foam</p>


Druh krytia sa môže meniť počas používania podľa toho ako sa preležanina hojí alebo zhoršuje.[†]

K dispozícii sú aj AQUACEL a AQUACEL Ag krytia.

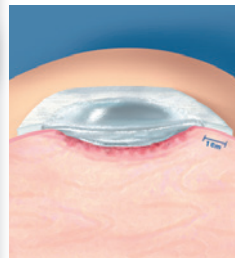
RADY A TYPY PRE APLIKÁCIU KRYTIA*



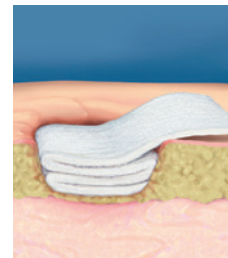- Krytia AQUACEL™ Extra™ a AQUACEL™ Ag+ Extra™ by mali presahovať aspoň o 1 cm na kožu v okolí rany.
- Pre hlboké rany odporúčame použiť krytie AQUACEL™ a AQUACEL™ Ag+ výplň.



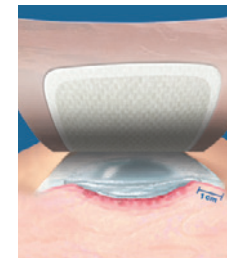- Pri aplikácii krytia do hlbokej rany je potrebné vyplniť ju len do 80%, aby sa umožnila expanzia krytia pri jeho kontakte s tekutinou v rane.
- Pri použití krytia AQUACEL™ a AQUACEL™ Ag+ výplne je potrebné ponechať najmenej 2,5 cm prečnievať z rany pre jeho ľahšie odstránenie.



Perfektní partneri

- Používajte penové krytie AQUACEL™ Foam alebo AQUACEL™ Ag Foam ako sekundárne krytie pre krytia AQUACEL™ Extra™ alebo AQUACEL™ Ag+ Extra™.
- Absorbčný vankúšik penového krytia AQUACEL™ Foam/AQUACEL™ Ag Foam by mal presahovať ranu aspoň o 1 cm.

AQUACEL, AQUACEL Extra a GranuFlex sú ochranné známky spoločnosti ConvaTec Inc a sú registrované ochranné známky v USA. © 2014 ConvaTec Inc AP-014364-MM

* Prečítajte si prosím príbalový leták s podrobnými informáciami o produkte a jeho použití. † Zvážte použitie antimikrobiálneho krytia pre preležaniny, ktoré sú infikované alebo s rizikom vzniku infekcie. ‡ Spätná klasifikácia by nikdy nemala byť použitá na opis hojenia preležanín. Reference: 1. European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Treatment of pressure ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009. 2. http://www.npuap.org/wp-content/uploads/2012/01/NPUAP_position_on_staging-final.pdf

StomaLinka
ConvaTec

0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Zákaznícke centrum ConvaTec, Unomedical, s.r.o., Štúrova 71A, 949 01 Nitra, tel.: 037/77 64 931, fax: 037/77 64 933
www.convatec.sk

Distribúcia:
STOMIA, s.r.o., Staničné námestie 1, 040 01 Košice, tel./fax: +421/55/625 22 88, tel.: 055/623 00 67, 055/623 13 41, mobil: 0907 794 861, e-mail: stomia@stomia.sk (možnosť zásielkovej služby)
PHAREX, s.r.o., Prieloztek 1, 036 01 Martin, tel.: + 421/43/381 04 70, fax: +421/43/422 35 69, mobil: 0918 910 999, e-mail: objednavky@pharex.sk, nemcecka@pharex.sk (možnosť zásielkovej služby)
PHOENIX, Z.z., a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, tel.: +421/2/499 99 111, fax: +421/2/499 99 117



ConvaTec